



**CONDICIONES TOMA Y CONSERVACIÓN DE MUESTRAS COVID-19**

Examen	Tipo de muestra	Toma de muestra	Transporte y conservación	Resultados	Rechazo
SARS CoV2	ANF, AT, LBA, <b>HNF</b>	Mínimo 1mL de muestra en recipiente estéril. Cerrar bien Para hisopados utilizar idealmente tórula de dacron o nylon.	Enviar inmediatamente al laboratorio REFRIGERADO. En caso de no ser posible su envío inmediato, mantener a 4°C por un máximo de 24hrs y enviar al laboratorio. EXCEPCIONALMENTE, puede mantenerse congelado a -20°C por un máximo de 48 hrs	24 – 48 horas	1.Recipiente con anticoagulante o medio inadecuado, no estéril 2.Derrame del espécimen 3.Muestra escasa o ausente 4.Tipo de muestra inadecuado 5.Tiempo de transporte inadecuado 6.Incumplimiento de cadena de frío 7.Recipiente sin rotular 8.Discrepancia entre rótulo del recipiente y formulario de solicitud de examen 9.Rótulo ilegible

Además se recomienda tomar muestra DE HISOPADO NASO y ORO faríngeo y agregar ambas tórulas en un tubo ESTÉRIL con suero fisiológico o PBS en un volumen máximo de 2ml.

ANF: Aspirado nasofaríngeo

AT: Aspirado traqueal

LBA: Lavado broncoalveolar

**HNF: Hisopado nasofaríngeo**